



Hotline: 0800 / smilefree



POSIsmile™

Positioner
für einen perfekten Abschluss

Der POSIsmile™ ist ein vorgefertigter Positioner, der die Endokklusion des Patienten nach dem Entfernen der MB - Apparatur idealisiert. Der POSIsmile™ Positioner fixiert eine ideale Klasse I Position und bewirkt eine Pufferung gegen TMJ bezogene Irritationen. Luftlöcher in der Front erleichtern die Atmung.

Typische Anwendungsbereiche

Moderater Lückenschluss, Zwischenräume nach Endbänderung, geringer Diastema-Schluss, Torque 3° - 4°, Rotation 5° - 8° und bei ausreichendem Platz kann ein moderates Aufrichten erzielt werden.

Ein allgemeiner Lückenschluss wird durch die Größenbestimmung des POSIsmile™ korrigiert. In diesem Fall wird eine kleinere Größe empfohlen, als beim Patienten gemessen wurde. Bei Patienten mit moderaten Lücken können auch zwei POSIsmile™ Positioner in schrittweise kleineren Größen eingesetzt werden, um eine ideale Zahnstellung zu erzielen.



Auswahl der richtigen Größe

Um die richtige Größe des POSIsmile™ zu bestimmen, messen Sie bitte den Millimeterabstand distal von 3 bis 3 entlang der Inzisalkanten im Oberkiefer.

Der POSIsmile™ wird in drei Ausführungen hergestellt und kann somit der dentalen Situation angepasst werden:

Non Extraktion

OK I. Prämolaren Extraktion


OK/UK Prämolaren Extraktion

Non Extraktion

Extraktion zweier
Prämolaren OK

Extraktion zweier
Prämolaren OK + UK

	Non Extraktion	Extraktion zweier Prämolaren OK	Extraktion zweier Prämolaren OK + UK
Artikelnummer	07-0141 bis 07-0156	07-0173 bis 07-0184	07-0157 bis 07-0172
lieferbare Größen	42 - 58 mm	45 - 56 mm	45 - 60 mm

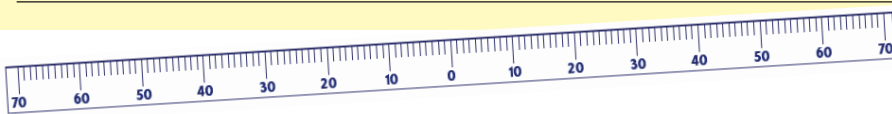

Meßschablone 14 cm, misst 70 mm beidseitig von der Mittellinie Artikelnummer: 07-0186

smile dental
Handelsgesellschaft mbH

smile dental Handelsgesellschaft mbH • Neanderstr.18 • 40233 Düsseldorf

Telefon +49 (0)211 23 80 9-0 • Telefax +49 (0)211 23 80 9-15 • info@smile-dental.de • www.smile-dental.de