


PIEZON® PS

DAS INSTRUMENT FÜR ALLE FÄLLE
EIN SCHWEIZER MEISTERSTÜCK



20-FACHE VERGRÖßERUNG

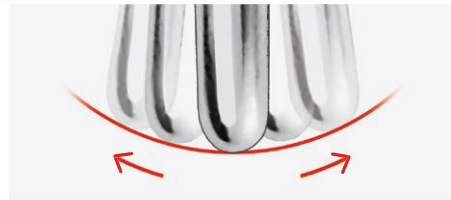

DIE LETZTEN 2 MM DES
PS INSTRUMENTS

EMS 
MAKE ME SMILE.


DAS INSTRUMENT FÜR ALLE FÄLLE

SCALING: EINFACH WIE NIE

DAS PIEZON® PS NO PAIN INSTRUMENT EIGNET SICH PERFEKT FÜR 95 % ALLER FÄLLE.


► Supra- und subgingivales Scaling und parodontales Debridement: Das EMS Perio Slim Instrument (PS Instrument) ist DER Standard für Prävention und Prophylaxe. Während andere Anbieter für ein Full-Mouth-Debridement mehrere Instrumente empfehlen, hat EMS das für alle Arbeitsschritte geeignete Original PIEZON® PS NO PAIN Instrument entwickelt.

Das Original PIEZON® PS NO PAIN Instrument ist so schlank wie eine parodontale Sonde. Es ist minimal invasiv, maximal präventiv und bei korrekter Anwendung schmerzfrei auf Grund der linearen Schwingungen der letzten 1-2mm des Instruments.

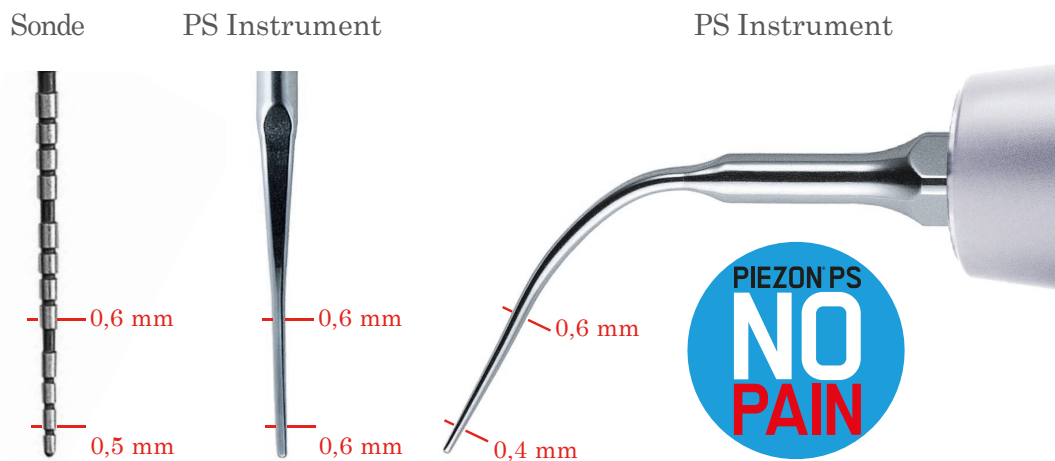

Die Verwendung eines einzigen Instruments vereinfacht die Abläufe im klinischen Alltag deutlich. Mit unserem speziell entwickelten PIEZON® PS Training Tool und den Swiss Dental Academy Kursen werden Sie zum PIEZON® PS Profi.

Das PIEZON® PS NO PAIN Instrument kann in allen Quadranten supragingival sowie subgingival bis zu einer Taschentiefe von 10 mm eingesetzt werden. Die konstante Effizienz wird für die gesamte Lebensdauer (mehr als 1000 Anwendungen) garantiert. Die Reinigungseffizienz und der extrem hohe Komfort für Patienten sind wissenschaftlich belegt.

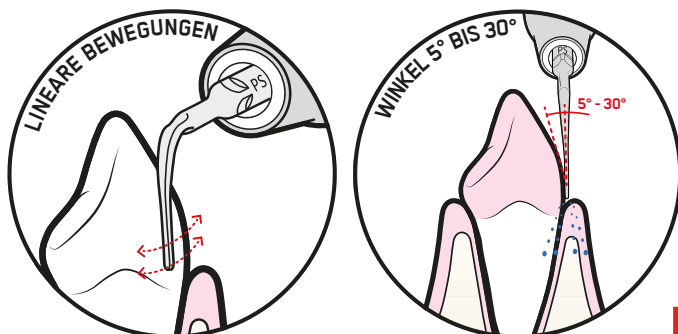

**MEHR INFOS ZU DEN
KLINISCHEN EIGENSCHAFTEN
DES PIEZON® PS INSTRUMENTS**



PERFEKTE SCHWEIZER HARMONIE

KEIN SCHMERZ

► Das Original PIEZON® NO PAIN System besteht aus drei Teilen: dem PIEZON® PS NO PAIN Instrument, dem leistungsstarken PIEZON® Handstück und der modernen NO PAIN Electronic Software.



► Die PIEZON® Systemtechnologie wurde ursprünglich 1981 in der Schweiz von Pierre Mabilie, einem der Gründer von EMS und dem früheren Eigentümer des französischen Unternehmens Satelec, erfunden.


Weiterentwickelt wurde die Methode mit der geballten technischen Expertise aus dem Vallée de Joux und in Zusammenarbeit mit Jaeger-LeCoultre (der berühmten Uhrenmanufaktur) sowie deren exklusiven Zulieferern.

► Seitdem wurde die Technik ständig weiter verbessert, um optimalen Behandlungskomfort und höchste Effizienz zu gewährleisten. Mithilfe von Piezokeramik werden die intelligenten elektronischen Signale des NO PAIN Moduls in eine mechanische Vibrationsbewegung umgesetzt. Dies versetzt das PIEZON® PS NO PAIN Instrument in eine perfekt lineare Bewegung.

► Die PIEZON® NO PAIN Feedback-Technologie sorgt für höchsten Patientenkomfort. Widerstand, der unter anderem durch Zahnstein hervorgerufen werden kann, wird erkannt und die Leistung entsprechend automatisch angepasst.

► Nur Original EMS PIEZON® Instrumente und Handstücke gewährleisten, dass die PIEZON® Leistung in vollem Umfang genutzt, die Zahnanatomie berücksichtigt und der Patient optimal behandelt wird.

20-FACHE VERGRÖßERUNG

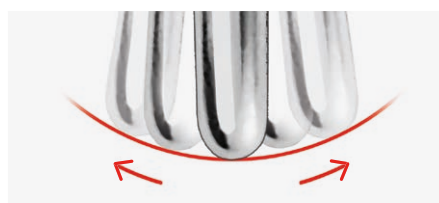

DER LETZTEN 2 MM DES PS INSTRUMENTS

ERLEBEN SIE DIE
LINEAREN
SCHWINGUNGEN



UNSERE INSTRUMENTE

**FÜR BESONDERE SITUATIONEN, BEISPIELSWEISE
EXTREM HARTNÄCKIGEN ZAHNSTEIN ODER
ZAHNZWISCHENRÄUME HAT EMS SPEZIELLE
UND EFFIZIENTE INSTRUMENTE ENTWICKELT.**



► Das PIEZON® P Instrument wird in allen Quadranten hauptsächlich zur supra- und subgingivalen (in Taschen bis zu 4 mm Tiefe) Entfernung von festen, hartnäckigen Ablagerungen und Zahnstein eingesetzt. Dieses Instrument ist die neueste Weiterentwicklung des nicht mehr erhältlichen PIEZON® A Instruments.

► Die PIEZON® PSR und PSL Instrumente sind besonders für die supra- und subgingivale (in Taschen von bis zu 8 mm Tiefe) Zahnsteinentfernung empfehlenswert. Sie ermöglichen einen effizienteren und komfortableren Zugang zu schwer erreichbaren Zahnzwischenräumen. Diese Instrumente dürfen nur bei Erwachsenen eingesetzt werden.

► Das PIEZON® PI Instrument verfügt über eine Spitzenummantelung aus Polyetheretherketon (PEEK), die eine sichere Reinigung

empfindlicher Flächen von Implantat-Abutments und Restaurationen ermöglicht. Dank der linearen Schwingungen gelingt das Debridement von Plaque bequem und sicher. Das Gerät eignet sich perfekt für die minimalinvasive Implantatpflege und bietet maximalen Patientenkomfort.


SO BESTELLEN SIE IHRE LIEBLINGSINSTRUMENTE

PIEZON® PS NO PAIN INSTRUMENT	REF DS-016A
PIEZON® P INSTRUMENT	REF DS-011A
PIEZON® PSR + PSL INSTRUMENTE	REF FS-461
PIEZON® PI INSTRUMENTE	REF DT-065A
FEILENHALTER 120°	REF DS-010A

ÜBUNG MACHT DEN MEISTER

► Um den PIEZON® NO PAIN Effekt zu erzielen, sind zwei Dinge unerlässlich: die richtige Schulung und die Anwendung der empfohlenen Behandlungsmethoden. Trainieren Sie Ihre Fähigkeiten mit den PIEZON® PS Training Tool und Kursen der Swiss Dental Academy!

► Arbeiten Sie nur mit den letzten 1-2mm der lateralen Seiten der Instrumentenspitze, um eine schmerzfreie Behandlung zu garantieren.

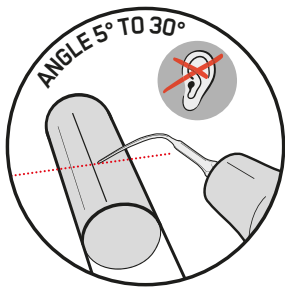

► Die richtigen Geräteeinstellungen, der richtige Winkel, ein angemessener Druck und gezielte Vor- und Rückbewegungen bilden die Voraussetzungen für eine minimalinvasive und angenehme Behandlung.

► Unangenehme Geräusche sind ein Hinweis darauf, dass Sie dem Patienten Schmerzen zufügen!

► Wenn Sie nichts hören, ist alles in Ordnung!

KORREKTE REIHENFOLGE

- 1. RICHTIGE EINSTELLUNGEN** – Stellen Sie Ihren AFPM auf „NO PAIN“: mindestens 70 % Wasser und maximal 60 % Leistung.
- 2. AUSRICHTUNG** – Halten Sie das Original PIEZON® PS NO PAIN Instrument mit der lateralen Seite parallel an das Röhrchen.
- 3. WINKEL** – Halten Sie das Instrument leicht angewinkelt (5°–30°). Nur die letzten 1–2 mm sollten den künstlichen Zahnstein berühren.
- 4. DRUCK** – Lassen Sie das Instrument arbeiten, üben Sie keinen Druck aus.
- 5. BEWEGUNG** – Bewegen Sie das Instrument in kleinen Vor- und Rückbewegungen entlang des Röhrchens. Entwickeln Sie ein Gespür für die linearen Schwingungen.





IN DIESEM VIDEO
ERFAHREN SIE
MEHR ÜBER DEN
OPTIMALEN
EINSATZ DES
PIEZON® PS
INSTRUMENTS



OPTIMALE EINSTELLUNGEN FÜR „NO PAIN“

EMPFEHLUNGEN

- Verwenden Sie nur die lateralen Seiten des Instruments und führen Sie es um den Zahn herum.
- Verwenden Sie nur die Spitze des Instruments.
- Die letzten 1–2 mm des Instruments sind der aktivste Teil.

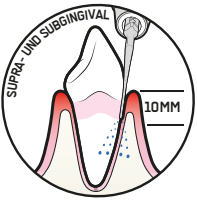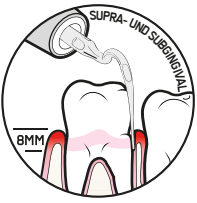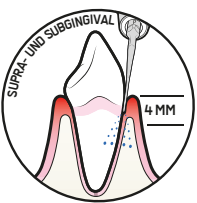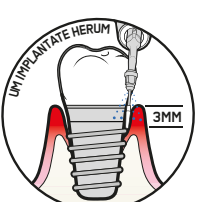Instrument	Fall	Empfohlene Leistungseinstellung	Empfohlene Wassereinstellung	Vorschläge
	Supragingival	10 %–100 %	70 % bis 100 %	Mit niedriger Leistung beginnen und bei Bedarf steigern.
	Subgingival → 10 mm	10 %–60 %		
	Kinder	10 %–60 %		
	Kieferorthopädie	10 %–60 %		Bracket nicht berühren, um Kratzer und Lockerungen der Befestigung zu vermeiden.
	Supra- und subgingival Zahnzwischenräume → 8 mm	10 %–60 %		Vorsicht: Dieses Instrument ist gewinkelt (links oder rechts) und leistungstärker als PS. Mit niedriger Leistung beginnen und bei Bedarf steigern.
	Hartnäckiger Zahnstein Supra- und subgingival → 4 mm	10 %–60 %		Mit niedriger Leistung beginnen und bei Bedarf steigern.
	Implantate Supra- und subgingival → 3 mm	10 %–60 %		Mit niedriger Leistung beginnen und bei Bedarf steigern.

ÜBERPRÜFEN SIE IHR PS INSTRUMENT




- Überprüfen Sie regelmäßig die Abnutzung Ihres PIEZON® PS NO PAIN Instruments, um Ihren Patienten ein Maximum an Komfort während der Behandlung zu garantieren.
- Sie müssen das PIEZON® PS Instrument wechseln, wenn die Spitze um 2 mm abgetragen ist.
- Abgenutzte Instrumente beschädigen die Sonotrode des Handstücks, sodass Sie ein neues Handstück kaufen müssen.


NEU



NACH BENUTZUNG

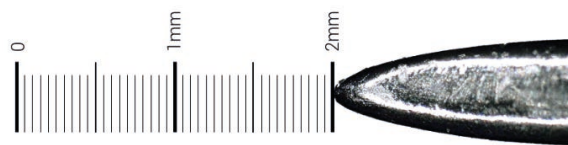

ERSETZEN!

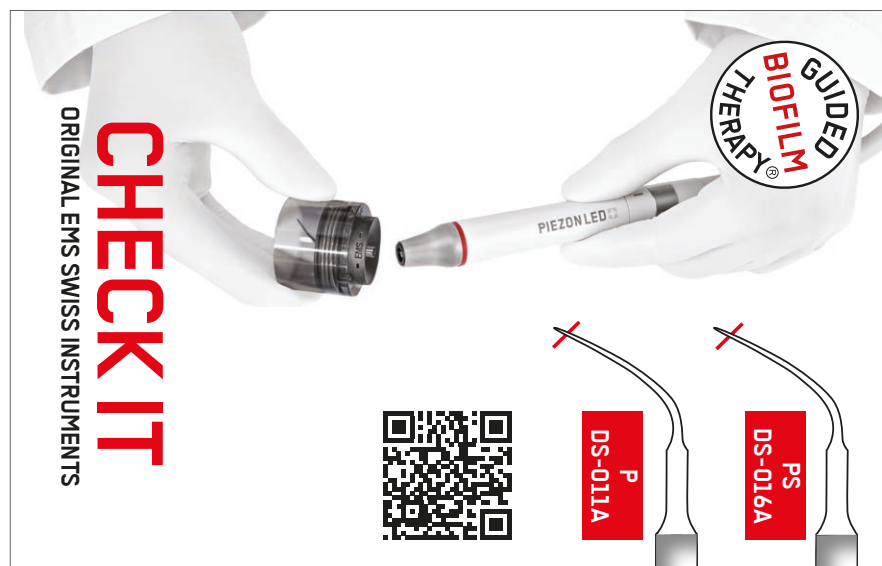

WARNUNG: WENN DIE SPITZE IHRES PIEZON® PS INSTRUMENTS UM 2 MM ABGETRAGEN IST, DÜRFEN SIE ES NICHT LÄNGER VERWENDEN!

VERWENDEN SIE NUR DAS ORIGINAL! KEINE KOPIEN!

„KOMPATIBEL“ IST TROTZDEM NUR EINE KOPIE!

► Schon lange sind billige Kopien, die angeblich mit den EMS PIEZON® Systemen „kompatibel“ sind, auf dem Markt erhältlich. Diese Produkte gefährden die Qualität Ihrer Behandlungen und die Unversehrtheit Ihrer Geräte!

► „Kompatible“ Spitzen sind nicht mit dem Original PIEZON® PS NO PAIN Instrument von EMS vergleichbar. Diese Kopien entsprechen nicht dem EMS Qualitätsstandard und sind nicht so präzise wie die in typisch schweizerischer Qualität mikrometrisch gefertigten EMS Produkte. Das Ergebnis ist eine Spitzenoberfläche, die qualitativ noch nicht einmal in die Nähe des Original PIEZON® PS NO PAIN Instruments kommt. Diese Kopien führen dann zu unregelmäßigen Schwingungen.

► Nur bei regelmässigen Schwingungen gibt es keine Schäden an Zähnen und Zahnfleisch. Keine Kopie kommt an das Original PIEZON® PS NO PAIN Instrument heran.




**DIE GLATTE OBERFLÄCHE DES PS INSTRUMENTS IST EIN
ENTSCHEIDENDER PARAMETER IN DER PIEZON® NO PAIN TRILOGIE.
KEINE ÄHNLICH AUSSEHENDEN SPITZEN BIETEN VERGLEICHBARE
OBERFLÄCHENEIGENSCHAFTEN.**

EINE BILLIGE KOPIE KANN GROSSEN SCHADEN ANRICHTEN

► Schützen Sie Ihre Geräte. Vertrauen Sie nur auf das Original PIEZON® PS NO PAIN Instrument und die EMS Originalgeräte. Mit sogenannten „kompatiblen“, gefälschten oder kopierten Spitzen riskieren Sie eine Beschädigung Ihrer hochwertigen EMS Komponenten.

Nur die Original EMS Produkte sind für den Einsatz mit den EMS Geräten zugelassen und durch eine Garantie geschützt – und nur diese Ausstattung gewährleistet die korrekte Durchführung der revolutionären Guided Biofilm Therapy. Warum wertlose kopierte Spitzen kaufen, wenn eine Behandlung mit dem Original nur 10 Cent kostet?

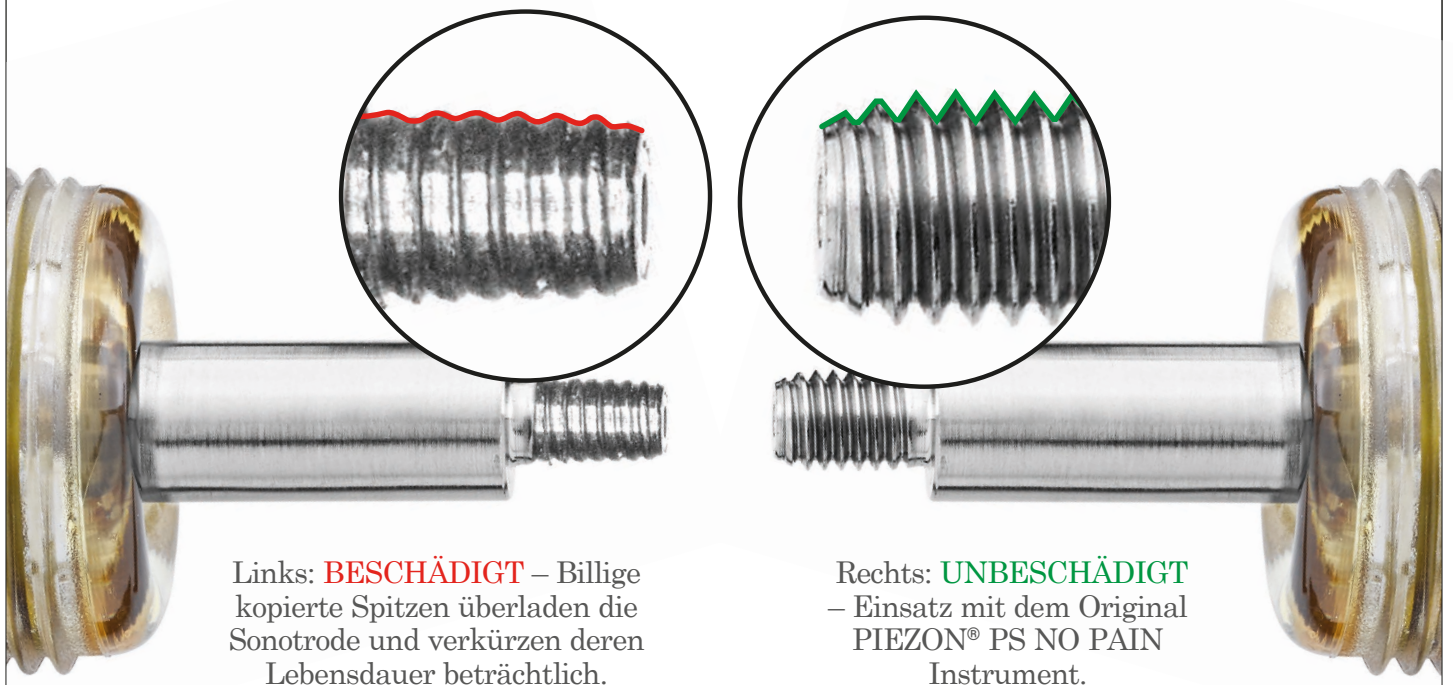

► Die Investition in Schweizer Qualität zahlt sich aus: Während mit den meisten kopierten Spitzen nur 100 bis 200 Scaling-Behandlungen durchgeführt werden können, kann das PIEZON® PS NO PAIN Instrument für mehr als 1000 Behandlungen genutzt werden, was die Behandlungskosten auf wenige Cents pro Patient reduziert. Was ist Ihnen Ihr Patient wert?

► Die Sonotrode des Original PIEZON® Handstücks besteht aus hochwertigem Titan. Bei den billigen Kopien ist das nicht der Fall – sie haben dieselbe Wirkung wie ein Gewindeschneider und beschädigen das wertvolle Handstück. Der Einsatz von Kopien führt daher zum Garantieverlust!

**SCHÜTZEN SIE DIE ZÄHNE IHRER PATIENTEN!
GEHEN SIE KEINE RISIKEN MIT KOPIERTEN SPITZEN EIN!**

BILLIG EINKAUFEN IST EIN GROSSER FEHLER



BILLIG EINKAUFEN KANN TEUER WERDEN

Es gibt kaum etwas auf der Welt, das nicht irgendjemand ein wenig schlechter machen kann und etwas billiger verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Machenschaften. Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann. Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten – das geht nicht. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn Sie dies tun, dann haben Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen.

John Ruskin (1819-1900)



**KAUFEN SIE NUR
ORIGINALPRODUKTE!**


ZUM WOHE IHRER PATIENTEN NUR DAS ORIGINAL!

SCHÜTZEN SIE IHRE PATIENTEN

- Nur das Original PIEZON® PS NO PAIN Instrument und das AIRFLOW® PLUS Pulver von EMS Schweiz garantieren eine schmerzfreie Behandlung Ihrer Patienten, ohne dabei deren Zähne zu beschädigen. Mit sogenannten „kompatiblen“, d. h. gefälschten Spitzen und Pulvern oder Kopien, riskieren Sie, die Zähne und das Zahnfleisch Ihrer Patienten zu verletzen.
- Nur die Original EMS Produkte sind für den Einsatz mit den EMS Geräten zugelassen und

durch eine Garantie geschützt – und nur diese Ausstattung gewährleistet die korrekte Durchführung der revolutionären GBT.

- Preisgünstige nachgemachte Instrumente führen zu unkontrollierten Schwingungen. Die Materialien sind minderwertig und die Spitzen brechen schnell. Der Komfort des Patienten wird zwangsläufig beeinträchtigt. Nur die PIEZON® NO PAIN Technologie sorgt für höchsten Patientenkomfort.

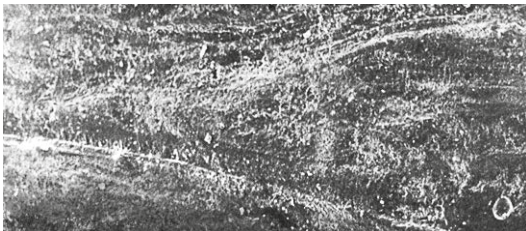

Links: **VERKRATZT** – Mit Instrument X behandelte Zahnoberfläche
Rechts: **GLATT** – Mit der Original PIEZON Methode und Schweizer EMS Instrumenten behandelte Zahnoberfläche



AIRFLOW®: VORSICHT VOR SOGENANTEN „KOMPATIBLEN“ PULVERN

- Viele Anbieter behaupten, dass ihre nachgemachten Pulver günstiger sind und problemlos mit EMS Instrumenten funktionieren. Doch das Gegenteil ist der Fall. Diese Pulver perforieren schnell die EMS AIRFLOW® Handstücke und beschädigen das Innere der EMS AIRFLOW® Geräte.
- Können Sie sich vorstellen, was diese Pulver an den Zähnen Ihrer Patienten anrichten? EMS empfiehlt den Behandlern dringend, Patienten nur mit EMS Pulvern zu behandeln.

► EMS warnt eindrücklich vor der Verwendung von nicht freigegebenen nachgeahmten oder gar gefälschten Pulvern. Vorsicht! Diese Pulver entsprechen nicht unseren strengen Qualitätskriterien. Die Quittung für diese „kostensenkenden“ Lösungen bezahlen letztlich Ihre Patienten.

- Behandeln Sie Ihre Patienten nur nach dem klinischen GBT Behandlungsprotokoll! Diese Patienten kehren dann auch gerne zum GBT Recall zurück. Bei einer Behandlung mit anderen Methoden oder Materialien werden sie sich hingegen schnell aus Ihrer Praxis verabschieden.



Sehen Sie selbst, wie das AIRFLOW® Handstück innerhalb von nur zwei Minuten durch ein gefälschtes Pulver zerstört wird. Was bewirken solche Pulver wohl im Mund Ihrer Patienten?



DAS BESTE KLINISCHE PROTO

► DIE GUIDED BIOFILM THERAPY IST EINE SYSTEMATISCHE, VORHERSAGBARE LÖSUNG BEI DER MODERNSTE TECHNOLOGIEN WIE AIRFLOW®, PERIOFLOW® UND PIEZON® ZU

08 NEUER RECALL

GESUNDER PATIENT = GLÜCKLICHER PATIENT

- Bestellen Sie Ihren Patienten risikoabhängig zum Recall
- Fragen Sie, wie ihm oder ihr die Behandlung gefallen hat

07 QUALITÄTS-KONTROLLE

PATIENTEN ZUM STRAHLEN BRINGEN

- Prüfen Sie anschließend, ob der Biofilm vollständig entfernt wurde
- Stellen Sie sicher, dass Zahnstein und Konkrement vollständig entfernt wurden
- Untersuchen Sie Zähne auf kariöse Läsionen
- Schützen Sie die Zähne mit Fluorid
- Keine Politur mehr nötig

06 PIEZON® PS


VERBLEIBENDEN ZAHNSTEIN ENTFERNEN

- Verwenden Sie supragingival und bis zu 10 mm subgingival das minimalinvasive EMS PS Instrument
- Reinigen Sie Taschen >10 mm mit einer Minikürette
- Verwenden Sie für Implantate bis zu 3 mm subgingival und implantat-getragene Restaurationen das EMS PI Instrument

05 PERIOFLOW®

BIOFILM ENTFERNEN IN TASCHEN >4 BIS 9 MM

- Verwenden Sie AIRFLOW® PLUS Pulver in tiefen Taschen bei natürlichen Zähnen, Furkationen und an Implantaten
- Verwenden Sie die neuen und schmalen tiefenmarkierten PERIOFLOW® Nozzles

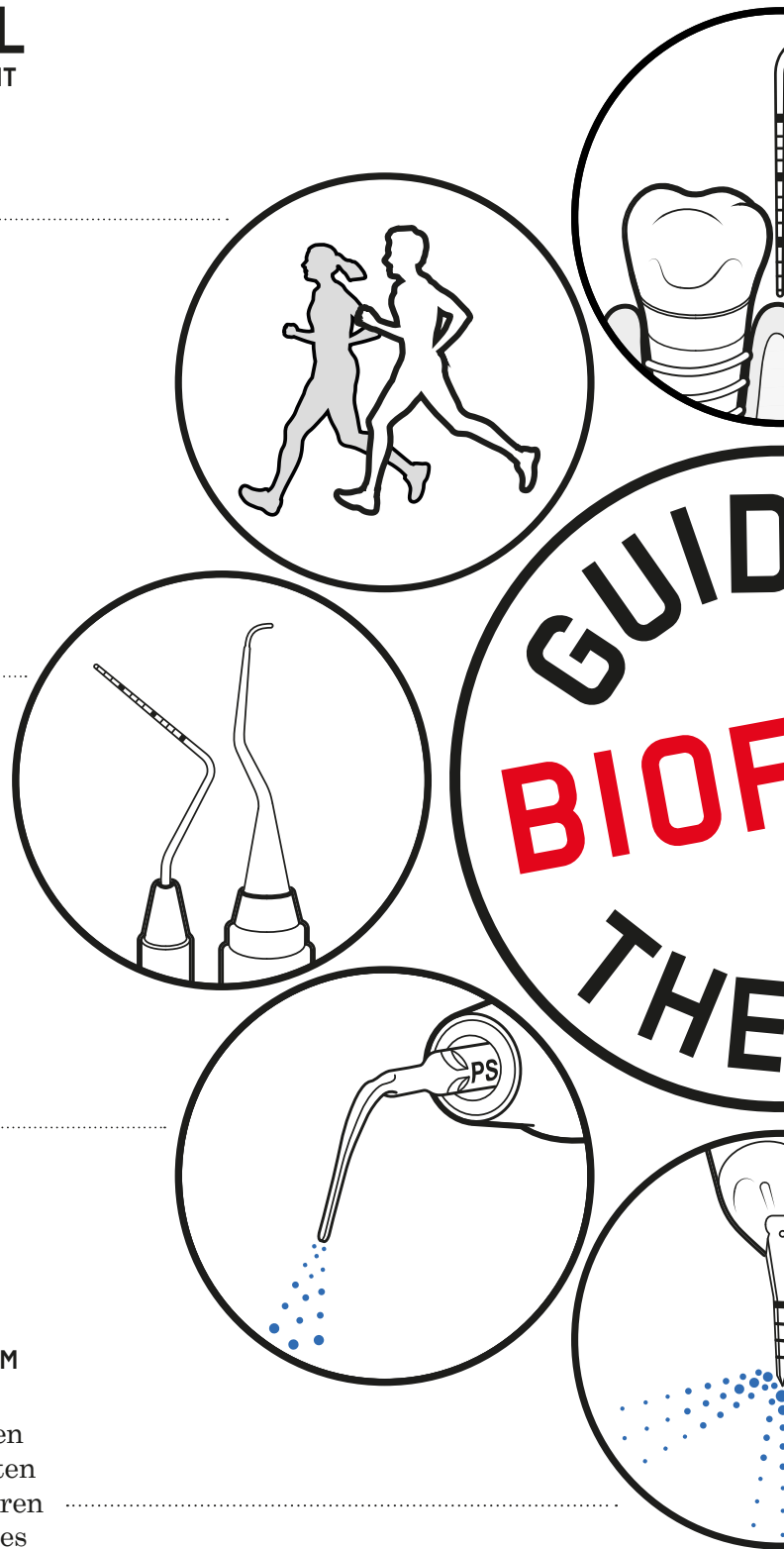

► Die PIEZON® Technologie ist der Eckpfeiler des GBT Behandlungsprotokolls. Behandler, die früher ausschließlich mit Ultraschall arbeiteten, sind begeistert von den Ergebnissen, der Effizienz und der Compliance, die sich durch die konsequente Anwendung erreichte.

UNG FÜR DAS BIOFILMMANAGEMENT IN DER PROFESSIONELLEN PROPHYLAXE,
UM EINSATZ KOMMEN. DIE WIRKSAMKEIT IST WISSENSCHAFTLICH BELEGT.

01 BEURTEILUNG UND INFEKTIONSSCHUTZ

MUNDGESUNDHEIT BEURTEILEN UND
HYGIENEMAßNAHMEN BEACHTEN

- Lassen Sie ihren Patienten zuerst mit BacterX® Pro spülen
- Untersuchen Sie Zähne auf Karies, Gingivitis, Parodontitis
- Untersuchen Sie das periimplantäre Gewebe auf Mukositis, Periimplantitis

02 ANFÄRBN

ANFÄRBN UND BIOFILM
SICHTBAR MACHEN

- Zeigen Sie Ihrem Patienten den angefärbten Biofilm und die Problemzonen mit dem EMS Biofilm Discloser
- Die Farbe steuert die Biofilm-Entfernung
- Sobald der Biofilm entfernt ist, ist der Zahnstein leichter zu erkennen.

03 MOTIVATION

INSTRUIEREN UND MOTIVIEREN

- Betonen Sie die Wichtigkeit der Prävention
- Instruktion der Mundhygiene
- EMS empfiehlt die tägliche Mundhygiene mit Interdentalbürsten oder Zahnseide sowie mit einer Hand- oder elektrischen Zahnbürste und AIRFLOW® Erythritol Zahnpasta

04 AIRFLOW® MAX

BIOFILM, VERFÄRBUNGEN UND
JUNGEN ZAHNSTEIN ENTFERNEN

- Verwenden Sie AIRFLOW® MAX für natürliche Zähne, Restaurationen und Implantate
- Entfernen Sie supra- und subgingivalen Biofilm und jungen Zahnstein mit PLUS Pulver 14 µm
- Entfernen Sie Biofilm auch von Gingiva, Zunge und Gaumen
- Entfernen Sie restliche Schmelz-Verfärbungen mit CLASSIC Comfort Pulver

DER GAME CHANGER

„Ich war gerade zur routinemäßigen Zahnsteinentfernung bei meiner Dentalhygienikerin und kann nicht glauben, wie anders es sich angefühlt hat.

Normalerweise reagieren meine unteren Schneidezähne sehr empfindlich auf die Behandlung, aber dieses Mal habe ich dort fast nichts gespürt!“

**HARRIS CHARLOTTE,
PATIENT**

„Mit den EMS Geräten können wir unsere Patienten wirklich für die Prophylaxe motivieren. Die Behandlung hinterlässt ein angenehmes Gefühl im Mund – der **WELLNESSFAKTOR**. Verfärbungen verschwinden – der **SCHÖNHEITSFAKTOR**. Plaque wird vollständig entfernt – der **GESUNDHEITSFAKTOR**.“

**MICHAELA GRUL
ZAHNÄRZTIN**

ALL LOVE GBT!



„Die Geräte des Unternehmens EMS haben uns sehr dabei geholfen, das Vorgehen bei unseren Prophylaxeterminen zu vereinfachen und schonender und patientenfreundlicher (schmerzfreier) zu gestalten. Nach mehr als drei Jahren ist die Prophylaxe ein technisch und wirtschaftlich bedeutender Bestandteil unserer Zahnarztpraxis geworden. Zu verdanken haben wir das der wissenschaftlichen und technischen Kompetenz (z. B. NO PAIN mit der PS Spitze, PLUS Pulver) von EMS.“

**DR. NADINE STRAFELA-BASTENDORF,
ZAHNÄRZTIN**

„PIEZON® PS ist wirklich das vielseitigste Instrument für die Entfernung von hartnäckigem Zahnstein. Das schlanke Design ermöglicht einen minimalinvasiven Einsatz sowohl supra- als auch subgingival und sorgt gleichzeitig für höchsten Patientenkomfort.“

**CELSO DA COSTA
LEITER DER SDA & RDH – CH**

„Für die Entfernung von Ablagerungen muss nur wenig Druck ausgeübt werden, was das Scaling für den Anwender deutlich erleichtert.“

**FAYE DONALD
RDH – UK**

**“I FEEL
GOOD”**

„Die GBT hat mir richtig Spaß gemacht. Zum ersten Mal hatte ich keine Schmerzen bei der Ultraschallbehandlung. Wenn wieder diese Behandlung durchgeführt wird, komme ich gerne alle drei Monate wieder.“

**ALISSON BENON
PATIENTIN**

„Ich bin so zufrieden mit der GBT, dass ich keine andere Methode für die Zahnreinigung mehr akzeptieren würde. Dank der GBT gehe ich regelmäßig und gerne zu meinem Zahnarzt zur Prophylaxe. Und jedes Mal, wenn ich die Praxis verlasse, bin ich glücklich und freue mich über mein strahlend weißes Lächeln! Für mich ist die GBT zu einer großartigen Erfahrung geworden und ich kann sie nur wärmstens empfehlen!“

SABINE PAVICIC, PATIENTIN

**MEHR
ERFAHRUNGS-
BERICHTE LESEN**



IHRE PATIENTEN MÖCHTEN **WELLNESS** - KEINE SCHMERZEN



GBT

E.M.S.
Electro Medical Systems S.A.
Ch. de la Vuarpillière 31
1260 Nyon – Schweiz
41229944700
EMS-DENTAL.COM

EMS 
MAKE ME SMILE.